



# Instrucciones de uso y cuidado de careta protectora Eaton

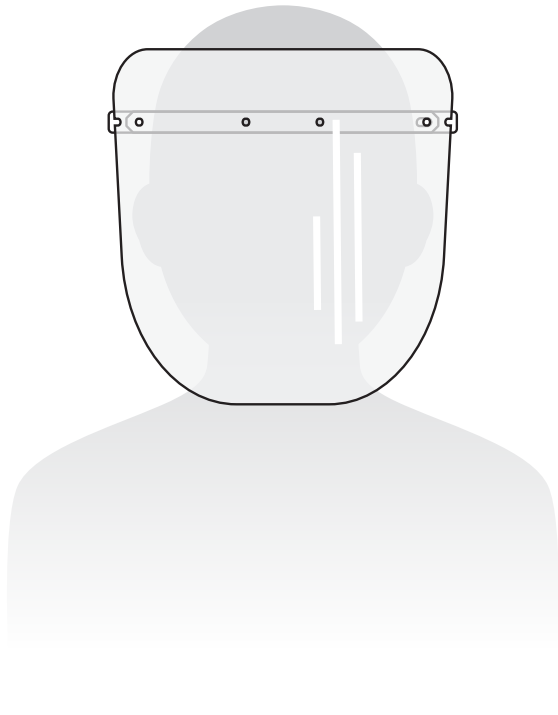

## Partes

### Careta

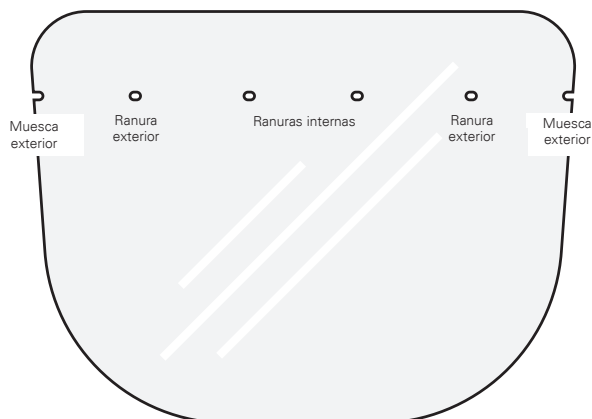

## ⚠ ADVERTENCIA

LEA Y COMPRENDA ESTA ADVERTENCIA ANTES DE USAR.

LA CARETA PROTECTORA PUEDE AYUDAR A REDUCIR LA EXPOSICIÓN DURANTE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES DE CUIDADO DONDE SE PREVEN SALPICADURAS O ROCIADORES POR AEROSOL. ESTA CARETA NO ELIMINA EL RIESGO DE CONTRAER INFECCIONES, ENFERMEDADES O LA MUERTE, INCLUYENDO VIRUS U OTROS AGENTES NOCIVOS. ANTES DE USAR, EL USUARIO DEBE LEER Y COMPRENDER ESTA ADVERTENCIA. SE DEBEN SEGUIR TODOS LOS PROCEDIMIENTOS REGLAMENTARIOS APLICABLES Y LAS POLÍTICAS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA. EL MAL USO DEL PRODUCTO TAMBIÉN PUEDE RESULTAR EN ENFERMEDAD O MUERTE. ESTA CARETA HA SIDO FABRICADA DE ACUERDO A LA GUÍA CDC PARA LA ENFERMEDAD DEL CORONAVIRUS 2019 (ESTRATEGÍA PARA OPTIMIZAR EL SUMINISTRO DE PROTECTORES FACIALES).


## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

LA CARETA NO ES UNA MASCARILLA NI UN RESPIRADOR APROBADOS POR LA FDA, EATON NO GARANTIZA QUE ESTA CARETA PROPORCIONE UNA PROTECCIÓN EQUIVALENTE. NO HA SIDO EVALUADA BAJO REQUISITOS DE INFLAMABILIDAD 16 CFR 1610, POR LO QUE EL USUARIO DEBE TOMAR TODAS LAS PRECAUCIONES NECESARIAS; COMO TAL, EL PRODUCTO NO DEBE UTILIZARSE EN PRESENCIA DE CUALQUIER FUENTE DE CALOR DE ALTA INTENSIDAD O GAS INFLAMABLE.

### Correa elástica



### Pieza de la cabeza (vista superior)

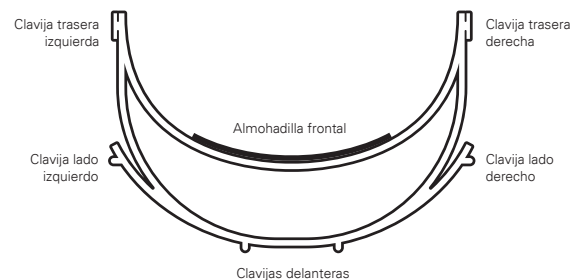


# EATON

Powering Business Worldwide


## Ensamble de la careta

- ❶ Quite las películas protectoras removiendo el plástico de la careta

La película protectora está presente en ambos lados de la careta. Cualquiera de los dos lados puede ser utilizada como parte frontal.

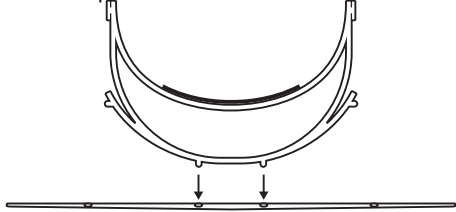


- ❷ Inserte las clavijas delanteras de la pieza que va en la cabeza, en la ranura interior. Asegúrese que el logotipo de Eaton esté boca arriba y que las clavijas estén en la parte inferior.

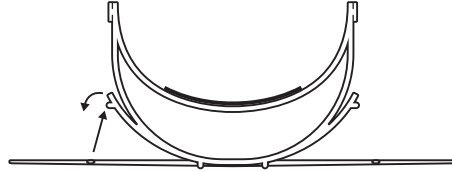


- ❸ Doble las clavijas laterales de la pieza de la cabeza hacia afuera para insertarlas en las ranuras de la careta.



- ❹ Coloque la correa elástica en su lugar en las clavijas traseras de la pieza de la cabeza. Tiene muescas que se pueden ajustar para mayor comodidad.

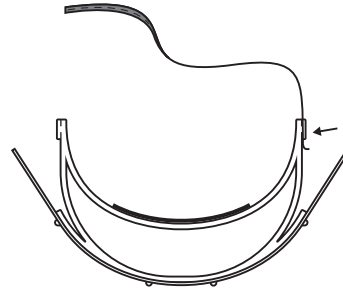

- ❺ Una vez que la correa elástica esté ajustada, doble los extremos de la careta para deslizar las muescas exteriores detrás de las clavijas de la pieza para la cabeza. Desmonte invirtiendo los pasos anteriores.

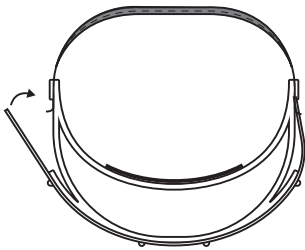

## Limpieza de la careta

La careta puede desmontarse fácilmente invirtiendo los pasos anteriores. Puede esterilizar la careta para reutilizarla. Limpie regularmente cada parte, según las mejores prácticas descritas por su organización o los CDC.

**Eaton**  
1000 Eaton Boulevard  
Cleveland, OH 44122  
United States  
Eaton.com

División Bussmann  
Poniente 148 núm. 933  
Industrial Vallejo  
Ciudad de México, 02300  
Eaton.mx/bussmannseries

© 2020 Eaton  
Todos los derechos son reservados.  
Impreso en México.  
Publicación núm. IL083001EN-spanish  
Mayo de 2021